

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodotto</b>                        | <u>KIT DI LAVAGGIO OCULARE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Codice</b>                          | 405 004 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Foto prodotto</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione</b>                     | <p>Stazione di lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile di cloruro di sodio 0,9%, monouso (ml. 500 cad.) con tappo oculare montato per un utilizzo rapido.</p> <p>Supporto termoformato con parte frontale trasparente dimensioni 40 x 30 cm, chiusura antipolvere, specchietto interno, viti e tasselli per l'applicazione a parete</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Elenco componenti</b>               | 2 flaconi di soluzione salina sterile da 500 ml, 2 doccette oculari integrate, 1 specchio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dati tecnici singoli componenti</b> | <p><b>FLACONE SOLUZIONE PER LAVAGGIO OCULARE 500 ML</b></p> <p>CODICE 405 003 875</p> <p>Soluzione per irrigazione, sterile, privo di endotossine apirogene.<br/>La soluzione contiene sodio cloruro 0,9% in flaconi di PE da 500 ml.</p> <p><u>Composizione:</u><br/><b>1000 mL di soluzione contengono:</b><br/>Cloruro di Sodio 9,00 g in acqua p.p.i.</p> <p><b>Elettroliti:</b><br/>NA<sup>+</sup> 154 mmol/L<br/>Cl<sup>-</sup> 154 mmol/L</p> <p><u>Modalità di utilizzo:</u></p> <p><b>Indicazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per irrigazione e lavaggio durante interventi chirurgici</li> </ul> |

- Per irrigazione di ferite e ustioni
- Per inumidimento di medicazioni, tessuti e vestiti
- Per la pulizia e il risciacquo di cateteri vescicali
- Per la pulizia e il risciacquo di stomie
- Per la pulizia e il risciacquo di strumenti e apparecchiature
- Per irrigazione intraoperatoria e postoperatoria (interventi endoscopici senza corrente ad alta frequenza, dopo interventi di resezione transuretrale)
- Per il riempimento di umidificatori dell'aria di respirazione (si consiglia l'uso del contenitore di volume uguale o superiore a 100 mL)
- Per irrigazione meccanica degli occhi (si consiglia l'uso del contenitore da 30 mL)
- Per irrigazione nasale (si consiglia l'uso del contenitore da 30 mL)

#### **Dosaggio**

La quantità di soluzione da utilizzare varia a seconda dei casi.

#### **Sovradosaggio**

Il sovradosaggio durante l'irrigazione delle ferite e l'applicazione intra-operatoria può portare all'assorbimento della soluzione di irrigazione che a sua volta può causare ipervolemia sotto forma di iperidratazione ipotonica (iponatremia).

Cefalea, nausea, irrequietezza e disorientamento sono sintomi di iperidratazione. Nei casi gravi si possono avere stati simili al coma.

#### **Interventi in caso di sovra- dosaggio**

Interruzione dell'irrigazione, correzione del bilancio idro- elettrolitico a seconda della particolare situazione clinica.

#### **Avvertenze e precauzioni**

Non usare per infusioni. Usare solo se il sigillo è integro e la soluzione è limpida. Conservare in contenitori chiusi; le quantità residue devono essere eliminate. Il riutilizzo di dispositivi monouso crea un potenziale rischio sia per il paziente che per l'operatore. Può provocare contaminazione e/o riduzione della funzionalità del dispositivo, che possono dar luogo a lesioni, malattie o morte del paziente. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Laddove sussista il rischio di assorbimento di grandi quantitativi di soluzione, come nel caso di impiego in cavità di grandi dimensioni o su lesioni estese, non utilizzare su pazienti in stato di iperidratazione. In tali situazioni, deve essere utilizzata con cautela nei pazienti con:

- Disidratazione ipertonica
- Ipopotassiemia,
- Ipernatremia
- Ipercloremia

- Disturbi in cui è indicata un'assunzione limitata di sodio, ad esempio insufficienza cardiaca, edema generalizzato, edema polmonare, ipertensione, eclampsia, grave insufficienza renale.

NaCl 0,9 % B. Braun non deve essere impiegato per procedure di irrigazione intratecale.

**Data di scadenza**

La soluzione non deve essere utilizzata dopo la data di scadenza riportata in etichetta.